


HƯỚNG DẪN CÁCH VỆ SINH BỘ XÔNG

Chú ý

- ⚠ Luôn vệ sinh bộ xông ngay sau khi sử dụng
- ⚠ Không tự ý sửa bất cứ bộ phận của bộ xông.

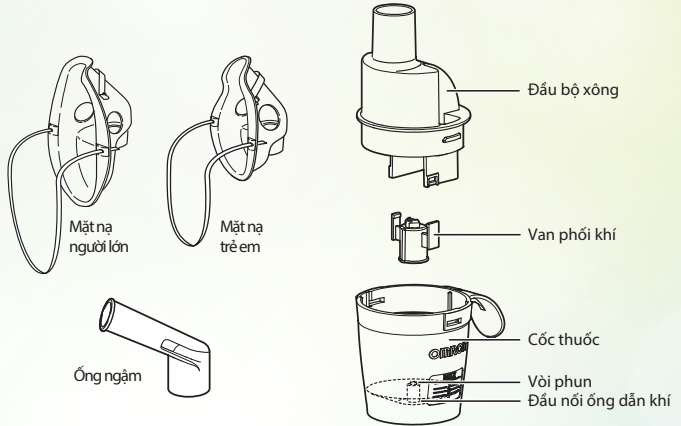


Vệ sinh và khử trùng

Vệ sinh các bộ phận **sau mỗi lần sử dụng** để loại bỏ thuốc còn đọng lại. Điều này giúp xông hiệu quả và tránh nhiễm trùng.

Các bộ phận được rửa

• Bộ xông và van phối khí


(đầu bộ xông, cốc thuốc), mặt nạ (PVC), ống ngậm, ống mũi (mua thêm)

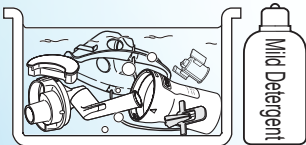

1. Rửa bằng nước ấm và xà phòng nhẹ.




2. Xả sạch bộ xông và đầu bộ phối khí dưới vòi nước máy sạch.

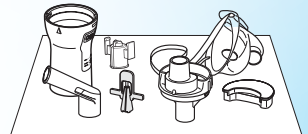

3. Làm khô bằng không khí ở nơi sạch sẽ

Khử trùng


Khử trùng các bộ phận 1 tuần 1 lần bằng cách đun sôi với nhiều nước. Nếu các bộ phận chuyển màu, hãy thay thế chúng.

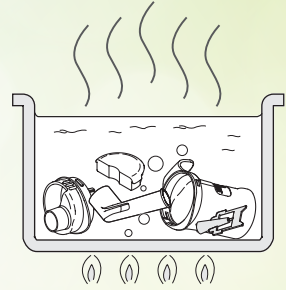


Không luộc mặt nạ người lớn, mặt nạ trẻ em, Bộ lọc khí và ống dẫn khí.



Thận trọng: Xử lý đầu bộ phổi khí

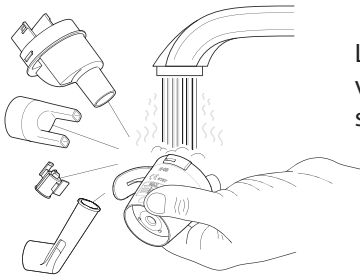

Luôn rửa sạch bộ xông và van phổi khí ngay sau khi sử dụng

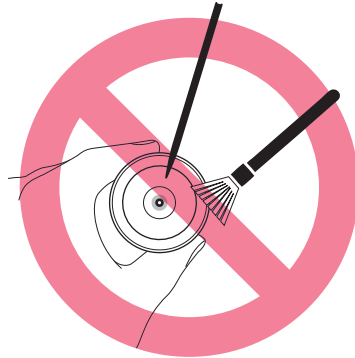

Không sử dụng bàn chải hoặc ghim để làm sạch van phổi khí vì nó có thể làm hư bộ xông.



Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng